

Betreft	Instructie geblazentest in Mira Opslaag als Positieve test
Van	Kwaliteitsteam: ICT consulent Linda Varkenvisser
Datum	17 november 2016

Toelichting

- Spirometrie onderzoek zoals normaal uitvoeren. (afb.1)
- In CareFusion blaas je alleen een Pre test
- **Na afsluiten CareFusion**, kies je in Mira voor ophalen gegevens, kies voor Base-test (afb.2)
- In de 2e kolom (Base) komen de geblazen waardes te staan,
- neem zelf de waardes over naar de 4e kolom (Post) (afb.3)
- Vervolgens noteer je in de 2^e kolom overal een 0 (afb.4)
- Opslaan
- Nu komen de waardes toch in het overzicht onder post meting (afb.5)

NB: Carefusion moet eerst afgesloten worden alvorens je de gegevens in het His ophaalt

The screenshot shows the CareFusion software interface. At the top, there is a table with columns: Datum meting, Volgnr, Lengte, Gewicht, BMI %, Vetvrije massa, Steroïde, Sigaretten, and Soort. Below this is a form for entering patient data: Datum meting (19-5-2016), Volgnr (1), Lengte in cm (167), Gewicht in kg (72,0), BMI % (25,8), FFM vetvrije massa (0,0), and Sigaretten (Rookt voorheen). There are buttons for 'Wijzig', 'Verwijder', and 'Annuleer'. Below the form are radio buttons for 'Spirometer', 'Steroïde', 'Bloeddruk', and 'ECG', with 'CareFusion' selected in a dropdown menu. There are buttons for 'Start apparaat' and 'Ophalen gegevens'. The main area contains a table of test results with columns: Norm FVC, Base FVC, % norm, Post FVC, % norm, Rev FVC, Norm FEV1, Base FEV1, % norm, Post FEV1, % norm, Rev FEV1, Norm TIF, Base TIF, % norm, Post TIF, % norm, Rev TIF, Norm PEF, Base PEF, % norm, Post PEF, % norm, Rev PEF. The values are mostly 0,00. At the bottom are buttons for 'Opslaan' and 'Sluit'.

Afb. 1

This screenshot is identical to Afb. 1, but with a dialog box open in the foreground. The dialog box has a yellow warning icon and the text: 'Van welke test wilt u nu de uitslagen importeren?'. It has three buttons: 'Base-test', 'Post-test', and 'Beide'.

Afb. 2

